

## UnbornHeart™ fetal Doppler in mobilna aplikacija – Hitri vodič

Namestite brezplačno aplikacijo (za iPhone, iPad ter večino mobilnih telefonov in tablic Android). Aplikacijo lahko najdete preko povezav za Apple App Store in Google Play, ki so na voljo na [www.unbornheart.si](http://www.unbornheart.si).



Namestite baterije. Namestite blazinice za slušalke. Povežite slušalke z Doppler-sondo in si jih nadenite.



Povežite kabel za pametni telefon s koncem DOPPLER z Doppler-sondo. Povežite konec PHONE z audio-vhodom vašega mobilnega telefona.



Nastavite mobilni telefon na način "Polet". Zaženite aplikacijo UnbornHeart. Nanesite dovoljšno količino gela za ultrazvok na vaš gol trebuh. Vključite Doppler in že ste pripravljeni za začetek opazovanja vašega dojenčka. Več informacij je na voljo v Navodilih za uporabo in v Pomoči za uporabnike, ki je vgrajena v aplikacijo.

Po uporabi: izklopite Doppler-sondo in z mehko krpo odstranite gel za ultrazvok s sonde.

UnbornHeart fetalni Doppler je CE-overjena naprava in razvrščena v razred EU MDD IIa in FDA razred II medicinskih naprav. UnbornHeart izdelki niso namenjeni kot nadomestilo za profesionalni zdravniški nasvet ali diagnozo. Če imate kakršnekoli pomisleke glede zdravja vašega dojenčka, se posvetujte z vašim ginekologom ali babico.

UnbornHeart fetalni Doppler ima enoletno garancijo.

Več informacij in odgovori na pogosta vprašanja na voljo na [www.unbornheart.si](http://www.unbornheart.si)